



## CAPMIX

### MÍCHAČKA KAPSLÍ

---

#### Návod k obsluze

##### Popis výrobku:

Pohon:	motor s kuličkovými ložisky se zabudovanou samovypínací ochranou proti přehřátí
Provoz:	krátkodobý provoz 3 min. (pro zabránění přehřátí motoru)
Řízení:	řízeno mikroprocesorem, vysoká přesnost času míchání
Držák kapslí:	s automatickou aretací, pro kapsle o průměru max. 19 x 38 mm, max. 6 g
Kryt:	ocelové dno, horní kryt z odolného plastu
Frekvence míchání:	4450 otáček za minutu +/- 5% s 6g kapslí
Doporučená provozní teplota:	18 - 40°C
Napětí:	110 V, 220 V, 240 V - 50/60 Hz nastavené napětí - viz typový štítek
Příkon:	330 VA
Rozměry:	195 mm x 160 mm x 195 mm

Hmotnost: 3750 g

#### Uvedení do provozu

**POZOR:** Před uvedením CAPMIXu do provozu zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní straně přístroje souhlasí s napětím v síti.

CAPMIX připojte kabelem na síť a zapněte vypínačem na zadní straně přístroje. Na displeji se ukáže "Program 1".

#### Základní nastavení provedené výrobcem:

Program 1 ( P 1 )	čas míchání 5 sekund
Program 2 ( P 2 )	čas míchání 7 sekund
Program 3 ( P 3 )	čas míchání 9 sekund
Program 4 ( P 4 )	čas míchání 12 sekund
Fixní čas ( 10 s )	čas míchání 10 sekund
Fixní čas ( 15 s )	čas míchání 15 sekund

#### Nastavení míchacího času:

Čas míchání lze nastavovat v rozmezí od 1 do 39 sekund. Stisknutím tlačítka + /- ( plus/mínus) se zvýší resp. sníží čas míchání o 1 sekundu. Stlačením a držením tohoto tlačítka se zvyšuje resp. snižuje nastavený čas.


#### Změna základního nastavení:

Nastavte čas míchání podle výše uvedených pokynů , pak stiskněte jedno z programových tlačítek ( P1 – P4) až zazní dvě krátké signály. Tím se potvrdí, že


požadované nastavení bylo uloženo ve vybraném programu.

### Vsazení kapsle

Průhledný horní kryt odklopte dozadu. Stisknutím uvolňovací kapslí odjistěte.

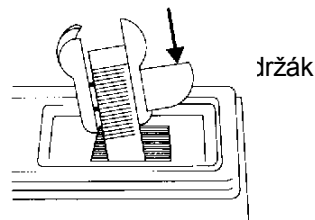

Abyste otevřeli držák kapslí, posuňte pak uvolňovací páčku doleva.

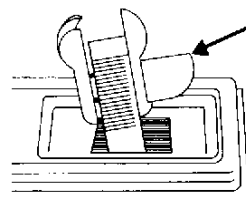

Aktivovanou kapsli vložte mezi mističky držáku a uvolňovací páčku uvolněte. Kapsle je nyní automaticky pevně držena.

Špičatou kapsli vložte tak, aby špička ukazovala doleva.

### Míchání

Po uzavření horního krytu stiskněte tlačítko "START" - míchání začne probíhat a na displeji se ukazuje zbývající čas míchání.

**POZOR:** Z bezpečnostních důvodů nelze zahájit míchání při otevřeném krytu - v tomto případě ukazatel času bliká. Otevření krytu během míchání zastaví motor a přeruší tak míchání. Tím se kapsle mj. znehodnotí! Proto kryt otevírejte až po ukončení míchání kapsle.

Kromě toho nespouštějte nikdy míchání, aniž byste vložili do držáku kapsli

Po ukončení míchání se na displeji znovu ukáže předem nastavený čas, při stejném čase míchání následující kapsle tedy není třeba čas znovu nastavovat.

### Vyjmutí kapsle

Otevřete horní kryt. Stisknutím uvolňovací páčky šikmo dolů otevřete držák a kapsli vyjměte.

### Poruchy

V případě poruchy postupujte následujícím způsobem:

PORUCHA:	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
při zapnutém přístroji zhasl ukazatel času	a) neexistuje napětí b) defekt pojistky	a) přezkoušet kabel a napětí v síti b) vyměnit pojistku (viz níže)
motor se při nastartování nerozběhne	c) otevřený kryt d) přehřátý motor	c) zavřít kryt d) nechat přístroj ochladit

Upozornění: Opravu CAPMIXu smí provést pouze firma ESPE nebo jí zplnomocněný zástupce.




### Výměna pojistky

Přístroj vypněte a vytáhněte síťový kabel z přístroje. Pojistka se nachází na zadní straně přístroje vedle síťového vypínače.

Vsuňte malý šroubovák za malou destičku "vsuvky" s pojistkou (viz. obrázek) a trochu ji vytlačte. "Vsuvku" z přístroje vyjměte.

Zarážku (viz obrázek) stiskněte směrem nahoru a držák pojistky vysuňte.  
Vyjměte pojistku z držáku a nasadte novou.

**POZOR:** Používejte pouze pojistky se stejnou hodnotou!

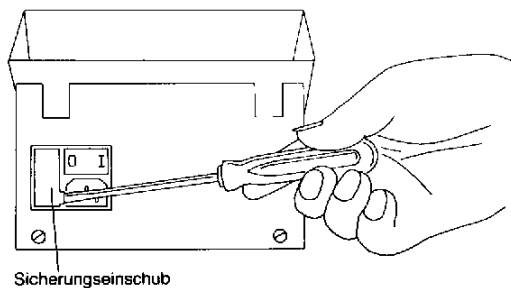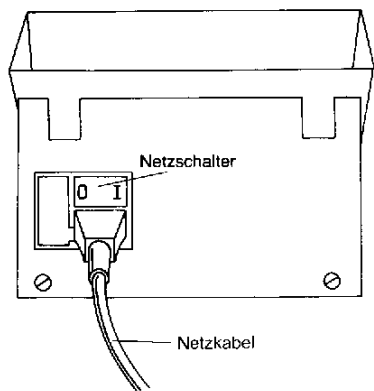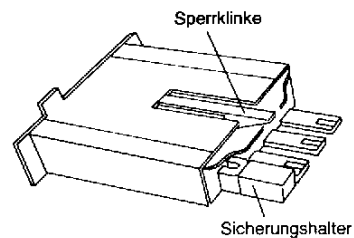

Držák pojistky zasuněte zpět do "vsuvky", až zarážka slyšitelně zacvakne. "Vsuvku" s pojistkou vložte zpět do přístroje. Malá destička přitom ukazuje směrem k zástrčce.

### Čištění, údržba

Plastové díly přístroje čistěte měkkým hadříkem, popř. jemným čisticím prostředkem. V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla nebo drsné prášky, plastové části by se mohly poškodit.

Údržbu ložisek neprovádějte.