

# MD 555

## Speciální čistící prostředek pro odsávací zařízení

MD 555 je nepěnicí speciální čistící prostředek pro odsávací zařízení používaný ve stomatologické praxi vč. jejich odtokového potrubí. Použití MD 555 je doporučeno u problematických vod z vodovodu (např. vysoká tvrdost vody, těžko rozpustné soli ap.), stejně jako u kanalizačních potrubí s nevhodným odtokem. Při pravidelném použití MD 555 se zamezí tvorbě povlaků a ucpávání a nánosy již přítomné se rozpustí. Díky svým speciálním účinným a pomocným látkám je MD 555 obzvláště vhodný pro zařízení se separátorem amalgámu. Kromě toho se dá MD 555 použít univerzálně všude tam, kde je potřeba plošně odstranit nánosy od tvrdé vody (např. na obkladačkách, kachelích, dřezech).

Složení: MD 555 obsahuje organické kyseliny, nepěnové tenzidy, inhibitory koroze, barevný indikátor a pomocné látky ve vodném roztoku.

Použití: MD 555 se v problematických případech používá v 10 % koncentraci (100 ml MD 555 doplnit vodou do 1 litru). Optimálního účinku je dosaženo po 1 - 2 hodinách působení. Při pravidelném používání MD 555, např. před polední pauzou, používejte podle kvality vody jedenkrát až dvakrát týdně jako 5 % roztok (50 ml/l vody), přičemž doba působení se pohybuje mezi 15 - 30 minutami.

Odsajte 1l roztoku přes sací hadice za použití OroCup. 1l roztoku aplikujte rovněž do plivátka. Po uplynutí doby působení propláchněte zařízení 1l vody.

Odsávací zařízení nedezinfikujte před uplynutím doby působení MD 555 přípravkem **Orotol®PLUS** nebo **Orotol®ULTRA**.

Pokyny: MD 555 není vhodný k použití na hliníkové nebo jiné povrchy citlivé vůči působení kyselin.

Ch.-B./použitelné do: viz potisk

### Dráždivý

Dráždí oči. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice.