

## Orotol®PLUS

### Dezinfekce odsávacích zařízení

Orotol®PLUS je vysoce účinný koncentrát pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a péči o stomatologická odsávací zařízení a plivátka a je vhodný pro všechny separátory amalgámu. Vybrané dezinfekční a čisticí složky dosahují intenzivní péče, a přitom jsou šetrné k materiálům a životnímu prostředí a nepění. OROTOL®PLUS neobsahuje aldehydy, fenoly, ani aktivní chlór.

**Složení:** 100 g Orotol®PLUS obsahuje: 8,8 g dimethyl-dioctyl-ammoniumchloridu 50 %, 1,2 g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammonium-chloridu 50 %, alkalické čisticí složky, komplexotvorné látky, speciální látky zabráňující pění, pomocné látky.

**Spektrum účinnosti:** baktericidní vč. Mycobacterium tuberculosis, fungicidní, virucidní (opouzdřené viry, neopouzdřené adenoviry, HBV1), HCV2) a HIV3)). **Seznam DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie). Registřík ÖGHMP.**

**Použití:** Orotol®PLUS se používá v 2 % koncentraci. Příklad ředění: 20 ml Orotol®PLUS (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte studenou vodou do 1 litru a **za použití OroCup odsajte.**

Použití	Koncentrace	Doba působení
Dezinfekce odsávacích zařízení	2 %	60 min.
Bakterie a houby	2 %	5 min.
Mycobacteria	2 %	60 min.
Opouzdřené viry	2 %	10 min.
Neopouzdřené adenoviry	2 %	30 min.
HBV1) a HIV3)	2 %	30 min.
HCV2)	2 %	30 s

- 1) elektronmikroskopická metoda, HBV-Marker-Test
- 2) zkouška na náhradním viru BVDV
- 3) účinnost proti HBV zahrnuje účinnost proti HIV.

Doporučujeme odsávací zařízení dezinfikovat a čistit přípravkem Orotol®PLUS v závislosti na provozu jedenkrát až dvakrát týdně - před polední pauzou a po ukončení ošetření; při jednorázovém použití pak výhradně večer po ukončení provozu. Plivátko event. ještě vydezinfikujte a vyčistěte dodatečně přípravkem Orotol®PLUS.

**Pokyny:** Po chirurgických zákrocích nárazově sáním propláchněte sklenicí studené vody. Neaplikujte do sacího zařízení ani plivátka žádné pěnicí látky.

Ch.-B./použitelné do: viz potisk

Dráždivý Dráždí oči a pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice.