

Lisa Mseal 12

přístroj pro svařování sterilizačních folií

Návod k použití

- 1 Vybalení přístroje
- 2 Všeobecné doporučení
- 3 Záruka
- 4 Instalace
- 5 Bezpečnost
- 6 Popis přístroje
- 7 Technická data
- 8 Používání
- 9 Čištění přístroje
- 10 Problémy a jejich řešení

Děkujeme, že jste si vybrali námi dodávaný přístroj pro svařování sterilizačních folií Lisa Mseal 12.

Naše firma je Vám kdykoli připravena zodpovědět dotazy týkající se tohoto přístroje.

Rádi bychom Vás upozornili, že pro správné používání přístroje je potřeba si přečíst návod a postupovat podle něj. Přejeme Vám pohodlnou práci s Vaším novým přístrojem.

1 **Vybalení přístroje**

Zkontrolujte, zda je obal nepoškozen, otevřete jej a zkontrolujte, zda balení obsahuje: Vlastní přístroj, napájecí kabel a veškeré vyobrazené díly.

2 **Všeobecné doporučení**

Tato příručka obsahuje informace

- k správné instalaci
- pro bezpečnou a spolehlivou funkci přístroje
- pro průběžnou údržbu

Přístroj může být používán jen pro svařování sterilizačních folií, jejich řezání z rolí a ne pro jiné účely.

Uživatel je odpovědný za správnou instalaci, provoz a užívání přístroje.

Pokud není přístroj používán správně, nebo není pravidelně a správně udržován, výrobce neručí za poškození zařízení, nebo obsluhujícího personálu.

Příručka je nedílnou součástí přístroje a musí být k dispozici obsluhujícímu personálu.

Přístroj smí obsluhovat pouze odborný personál.

3 **Výrobce W&H Sterilizace dává 12 měsíců záruku** na Mechanické a elektrické díly přístroje. Záruka platí nejdéle 24 měsíců od expedice z výrobního závodu a začíná dnem převzetí přístroje zákazníkem.

Záruka je platná pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu s uvedením výrobního čísla přístroje a data převzetí zákazníkem.

Záruka neplatí na chyby, nebo vady způsobené:

- Nesprávnou instalací
- Nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou
- Nevhodnou manipulací, nebo úpravami
- Nesprávným používáním přístroje
- Nedbáním doporučení této příručky

Případné závady přístroje neopravňují k výměně celého přístroje.

Opravy v záruce jsou prováděny na náklady W&H Sterilizace, ne však náklady na balení a transport.

4 Instalace

Svářečka folií Lisa Mseal 12 byla testována a vyzkoušena ve výrobním závodě. Při instalaci dbejte následujících pokynů.

- Příklad postavte na rovnou plochu, tak aby umístění umožňovalo pohodlnou práci.
- Příklad neumistujte vedle dřezu, kontakt s vodou by mohl způsobit elektrický zkrat.
- Neumistujte jej ani v blízkosti zdrojů tepla.
- Prostor ve kterém je přístroj umístěn musí být přirozeně odvětrávaný.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není přiskřípnut, a že volně vede do zásuvky.
- Zasuňte napájecí kabel do zásuvky, přístroj je připravený provozu.

Přístroj je možno též připevnit na zeď (viz vyobrazení na str. 6 orig. Návodu)

5 Bezpečnost

Před použitím elektronické svářečky folií Lisa Mseal 12 se seznamte s bezpečnostními předpisy. Jen tak je možno zabránit poškození přístroje nebo obsluhy.

Varování: Nedotýkejte se prsty oblasti sváření, když je přístroj zapnut, nedávejte prsty pod nůž odřezávače folií.

Přístroj a jeho okolí udržujte v suchu a čistotě.

Nerozebírejte přístroj, pokud je připojen k napájení. Pokud potřebujete přístroj vyčistit, vyjměte vidlici ze zásuvky.

Pokud otíráte přístroj vlhkým hadrem, ujistěte se, že je vidlice vytažena ze zásuvky.

Před zapnutím zbavte přístroj vlhkosti.

Ujistěte se, že zásuvka je v souladu s předpisy místa užívání uzemněna a napájení odpovídá informaci na výrobním štítku.

Neodstraňujte výstražné etikety ani výrobní štítek.

Používejte jen originální náhradní díly.

Pokud máte nějaké problémy s funkcí přístroje, nejprve hledejte řešení v kapitole Hledání a odstraňování chyb.

6 Popis přístroje

Lisa Mseal 12 je nový revoluční přístroj pro sváření sterilizačních folií, který svařuje dlouhodobě konstantní teplotou a svárem o šířce 12 mm za jakéhokoli napětí sítě (v rámci povolené tolerance).

Lisa Mseal 12 je přístroj s moderním vzhledem ergonomicky navržený pro snadnou obsluhu a čištění. Přístroj se dodává s integrovaným držákem folií vhodným pro role 100 a 200m o maximální šířce 310mm.

Nová v tomto přístroji uplatněná technologie umožňuje snížení spotřeby proudu, krátké doby svařování bez chlazení mezi svary. Lisa Mseal 12 odpovídá plně evropským předpisům pro svařování sterilizačních folií.

7 Technická data:

Jmenovité napájení	230 V (na přání též 110V)/50Hz
Výkon	100 W
třída izolace	1
Pojistky	2 ks 5x20 –T4 A
Hmotnost	7,4kg
Šíře sváru	12 mm
Svařovací technika	konstantní teplotou
Šíře sváru	310 mm

8 Používání

- Před zapnutím se ujistěte, že je přístroj zapojen do uzemněné zásuvky. Spněte hlavní spínač vlevo na přístroji. Kontrolka vpředu se rozsvítí zeleně když svařovací odpor dosáhne potřebné teploty.
- Nasaďte sterilizační roli tak aby folie vedla mezi dvěma značkami.
- Páku skloňte dopředu na doraz. Po ukončení svaru se ozve zvukový signál a kontrolka se rozsvítí červeně.
- Vraťte páku zpět do horní polohy. Kontrolka se zbarví zpět do zelena. Přístroj je připraven pro další svar. Pokud by páka nebyla zvednuta, topné těleso se automaticky vypne, aby nedošlo k přepálení folie a ton zní dokud není páka vrácena do horní polohy.

9 Čistění přístroje

- Přístroj čistěte zvenčí vlhkým hadrem, nejprve však vyjměte vidlici ze zásuvky. Před opětovným zapojením se ujistěte, že je přístroj zcela suchý. Přístroj nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Údržba a výměny jednotlivých částí přísluší odborné servisní organizaci.

10 Řešení problémů

Prosvětlený spínač nesvítí:	Žádné napájení Pojistky u napájení Vadná kontrolka	Počkat Vyměnit Vyměnit
Kontrolka se nerozsvítí:	Vadná deska elektroniky LED nefunguje Topné těleso nefunguje	Vyměnit Vyměnit Vyměnit
Přístroj sváří, kontrolka svítí zeleně	Vadný mikrospínač	Vyměnit
Topné těleso sváří, ale svár není správně proveden	Nedostatečný tlak Silikon opotřeben	Zkontrolovat upevnění silikonové gumy Vyměnit